

Nettec Solution AG

MASK-50
EAN 7630003326123



Gesichtsmaske , 50-er Pack

Hygienemasken zur einmaligen Nutzung aus dreilagigem Vliesstoff mit elastischen Ohrenschlaufen. Die Hygienemasken eignen sich für den zivilen Gebrauch zum Schutz vor Tröpfchen, Spritzern und groben Partikeln und reduzieren so Risiko einer Infektion. 3-lagiger Vliesstoff, Hygienemaske mit elastischen Ohrenschlaufen nur zum einmaligen Gebrauch geeignet, Farbe: blau, 1 Stück (Stk.) = 1 Box Á 50 Hygienemasken. Hygienemaske richtig anlegen: Waschen Sie Ihre Hände vor jeder Verwendung einer Hygienemaske gründlich mit Wasser und Seife oder benutzen Sie ein Händedesinfektionsmittel. Setzen Sie die Hygienemaske vorsichtig auf. Die Hygienemaske sollte eng am Gesicht anliegen. Mund und Nase müssen vollständig bedeckt

und Spalten zwischen Gesicht und Hygienemaske verhindert werden. Sobald Sie die Hygienemaske aufgesetzt haben, sollten Sie diese nicht mehr berühren. Waschen Sie nach dem Ausziehen der Hygienemaske Ihre Hände mit Wasser und Seife oder benutzen Sie ein Händedesinfektionsmittel. Hygienemasken können, auch wenn diese feucht sind, für mindestens 2 bis 4 Stunden getragen werden. Ersetzen Sie die Hygienemaske nach maximal 8 Stunden durch eine neue, saubere und trockene Hygienemaske. Entsorgen Sie die Hygienemaske nach Verwendung sofort in einem geschlossenen Abfalleimer. Halten Sie die empfohlenen Hygienemassnahmen des BAG auch während des Tragens einer Hygienemaske ein!

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innen-VPE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |